

303 _____

(печатка закладу)

Дата _____

До лабораторії

(вказати назву)

**НАПРАВЛЕННЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДБОРУ/
ПРОБ СУМІСНОСТІ КРОВІ**

Відділення _____

Пацієнт:

1. Прізвище та ім'я _____

2. Дата народження або ідентифікаційний код _____

3. Діагноз _____

4. Група крові (за системами АВ0 і Резус) _____

5. Імунні антитіла _____

6. Реципієнт: першоразовий, багаторазовий; вагітності _____

(потрібне підкреслити)

7. Дата останнього переливання _____

8. Підпис та печатка лікаря, відповідального за переливання продуктів крові _____

9. Дата і час взяття зразка крові

« _____ » _____ 20 ____ р. _____

(Прізвище І. П., підпис особи, яка бере кров)

10. Компоненти крові, що видаються банком крові

Група крові / Номери контейнерів _____

Підпис працівника банку крові _____

Вимоги до зразка для консультаційних імуногематологічних аналізів

1. Зазначити прізвище, ім'я пацієнта на етикетці одноразової пробірки.
2. Узяти 5 мл венозної крові в підготовану відповідно до п.1 одноразову пробірку. У новонароджених, немовлят і малих дітей беруть менші об'єми крові (1-3 мл)!
3. Заповнити супровідну документацію (Направлення на консультативні імуногематологічні аналізи, Направлення для проведення індивідуального підбору/проб сумісності).
4. Якщо аналізи планується проводити:
 - 4.1 в день взяття зразка:
 - витримати зразок при температурі +18 - +22°C 30 хвилин до повного утворення згустку або помістити в термостат при 37°C на 15 хвилин;
 - центрифугувати зразок 10± 5 хвилин при 1500 об/хв.
 - 4.2. наступного дня:
 - відокремити згусток від стінок пробірки і помістити в холодильник при температурі 2-6°C;
 - наступного дня зразки крові центрифугувати 10± 5 хвилин при 1500 об/хв (за потребою).
5. Транспортувати зразок до лабораторії ХОЦСК у спеціальних контейнерах, на дно яких укладається серветка з адсорбуючого матеріалу з дотриманням вимог «холодового ланцюга» та інфекційної безпеки. Не допускається транспортування зразків крові у картонних коробках, дерев'яних ящиках, поліетиленових пакетах.
6. Супровідна документація (направлення) упаковуються окремо. Забороняється обертати їх навкруги пробірки зі зразком крові, вкладати в контейнер або бікс.
7. Критеріями для відмови в консультаційному дослідженні є:
 - відсутність маркування на пробірках;
 - відсутність направлення на аналіз;
 - невідповідність маркування на пробірці записам у супровідній документації;
 - невідповідність об'єму крові (занадто малий об'єм для проведення досліджень);
 - порушення правил транспортування зразків крові (не дотримання «холодового ланцюга»);
 - наявність гемолізу;
 - наявність хільозу.

*підготовку зразків проводити відповідно рекомендацій виробника пробірок