

Направлення
на консультативні імуногематологічні аналізи

Печатка ЛПЗ

Лікарня _____
Відділення _____

Дата _____
До імунологічної
лабораторії ХОЦСК

Прошу виконати аналіз _____

Прізвище, ім'я та по-батькові пацієнта _____

Дата народження _____

Адреса проживання _____

Анамнез:

• Трансфузійний _____
(переливання компонентів крові, _____
дати)

• Акушерський _____
(вагітності, дати)

Результати попередніх аналізів _____
(група, резус, антитіла)

Яке лікування проводиться _____
(для вагітних жінок)

Примітки:

1. Пробірка з кров'ю повинна бути промаркована.
2. Зразок крові в кількості 5-6 мл.

П.І.Б. лікуючого лікаря;
контактний номер тел.

Вимоги до зразка для консультаційних імуногематологічних аналізів

1. Зазначити прізвище, ім'я пацієнта на етикетці одноразової пробірки.
2. Узяти 5 мл венозної крові в підготовану відповідно до п.1 одноразову пробірку. У новонароджених, немовлят і малих дітей беруть менші об'єми крові (1-3 мл)!
3. Заповнити супровідну документацію (Направлення на консультативні імуногематологічні аналізи, Направлення для проведення індивідуального підбору/проб сумісності).
4. Якщо аналізи планується проводити:
 - 4.1 в день взяття зразка:
 - витримати зразок при температурі +18 - +22°C 30 хвилин до повного утворення згустку або помістити в термостат при 37°C на 15 хвилин;
 - центрифугувати зразок 10± 5 хвилин при 1500 об/хв.
 - 4.2. наступного дня:
 - відокремити згусток від стінок пробірки і помістити в холодильник при температурі 2-6°C;
 - наступного дня зразки крові центрифугувати 10± 5 хвилин при 1500 об/хв (за потребою).
5. Транспортувати зразок до лабораторії ХОЦСК у спеціальних контейнерах, на дно яких укладається серветка з адсорбуючого матеріалу з дотриманням вимог «холодового ланцюга» та інфекційної безпеки. Не допускається транспортування зразків крові у картонних коробках, дерев'яних ящиках, поліетиленових пакетах.
6. Супровідна документація (направлення) упаковуються окремо. Забороняється обертати їх навкруги пробірки зі зразком крові, вкладати в контейнер або бікс.
7. Критеріями для відмови в консультаційному дослідженні є:
 - відсутність маркування на пробірках;
 - відсутність направлення на аналіз;
 - невідповідність маркування на пробірці записам у супровідній документації;
 - невідповідність об'єму крові (занадто малий об'єм для проведення досліджень);
 - порушення правил транспортування зразків крові (не дотримання «холодового ланцюга»);
 - наявність гемолізу;
 - наявність хільозу.

*підготовку зразків проводити відповідно рекомендацій виробника пробірок